



**France  
Accessibilité**

1<sup>er</sup> réseau d'Entreprises régionales

**N° Vert 0 805 050 067**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

**IBIZA**

**Droit et simple**



[www.france-accessibilite.fr](http://www.france-accessibilite.fr)

# IBIZA

## IBIZA STANDARD

- Siège fixe, avec dossier et accoudoir fixes
- Maximum poids de l'utilisateur 120 kg
- Pente du Rail de 25° à 55°
- Joystick de Contrôle standard
- Affichage de diagnostic numérique sur le cache moteur
- Télécommande infra-rouge
- Assise pivotante manuelle
- Repose-pieds manuel
- Ceinture de sécurité
- **Option** - Bras articulé relevable motorisé
- **Option** - Platinum Horizon pour utilisation extérieure



## IBIZA PLUS

- Assise, dossier, accoudoir et hauteur réglables
- Convient pour les utilisateurs jusqu'à 140kg
- Pente du Rail de 25 ° à 62 °
- Joystick de Contrôle ergonomique
- Affichage du diagnostic numérique dans l'accoudoir
- Télécommande infra-rouge
- Assise pivotante manuelle
- Levier pour repose-pieds
- Ceinture de sécurité rétractable
- Repose-pieds réglable latéralement
- Choix de coloris du siege
- **Option** - Assise pivotante motorisée
- **Option** - Bras articulé relevable motorisé
- **Option** - Platinum Horizon pour utilisation extérieure



# Droit et simple

Le monte-escalier Droit Ibiza est conçu pour une installation rapide, facile et sans souci. Un monte-escalier Ibiza est là pour rendre votre escalier à nouveau accessible et vous offre une nouvelle liberté de déplacement dans votre maison.

Le design compact du Rail et son installation au plus près des marches assure à votre Ibiza de prendre aussi peu d'espace que possible. Ainsi, l'impact sur votre décoration intérieure reste très faible.

Avec deux modèles différents à choisir, la gamme Ibiza est adaptée pour tous, peu importe votre morphologie.

Pour un escalier droit qui vous prive de votre étage, il n'y a pas meilleure option que l'Ibiza. Demandez une démonstration à votre installateur.



Option - Bras articulé  
relevable motorisé



Option - Platinum Horizon  
pour utilisation extérieure



# IBIZA



Rendez  
votre étage  
accessible  
en seulement  
5 étapes



1

Abaissez les accoudoirs et l'assise de votre siège. Abaissez le repose-pieds. Votre Monte-escalier est prêt à l'emploi. L'écran numérique affiche « Platinum », signifiant que vous êtes prêt à vous déplacer.



2

Votre IBIZA sera entièrement ajusté à la taille et la forme de votre corps lors de l'installation.

De cette manière, vous n'avez qu'à vous asseoir, vous attacher, vous détendre et profiter de la balade!



3

Pour profiter de votre IBIZA, il vous suffit d'utiliser le joystick au bout de l'accoudoir et d'appuyer légèrement dans la direction souhaitée.



4

Une fois en haut de l'escalier, utilisez le levier de pivotement monté sous l'accoudoir (Le pivotement automatique existe en option), pour faire tourner la chaise et descendre en toute sécurité sur le palier.



5

Lorsqu'il n'est pas utilisé, votre IBIZA peut être plié et garé dans l'escalier, laissant l'accès libre pour d'autres personnes.

# IBIZA STANDARD

Le siège de l'Horizon standard, à travers une ligne élégante, offre tout le confort et la sécurité essentielle dont vous avez besoin. Avec un profil compact qui lui permet de frôler le mur, le Siège Standard de l'Horizon d'une couleur neutre s'intègre parfaitement dans votre maison.



## Joystick

Une facilité de contrôle à la portée du doigt.



## Clé de Sécurité

Pour prévenir de toute utilisation impromptue.



## Siège Standard

Simple, compact et confortable.



## Levier de pivotement

Permet de pivoter le siège une fois en haut des marches.



## Ecran de contrôle

Facilité de Lecture  
Informations en temps réel.



## Ceinture de Sécurité

Une sécurité supplémentaire lors que le fauteuil est en déplacement.



## Repose-pieds Manuel avec capteurs de sécurité

Ces capteurs de pressions arrêtent le déplacement s'il y a un obstacle sur le trajet.



## Degré de pente

De 25° à 55°



## Poids Limite

120kg

# IBIZAPLUS avec Siège ERGO

Le siège ERGO livré avec l'Ibiza est l'un des plus avancés du marché. L'ERGO est livré avec des accoudoirs et une assise réglable, un dossier adapté à tout utilisateur et de nombreuses fonctionnalités intégrées.




## Joystick design

Une facilité de contrôle à la portée du doigt.



## Clé de Sécurité

Pour prévenir de toute utilisation impromptue.

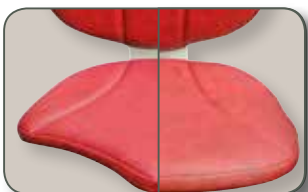

## L'Assise ERGO

Courte ou longue, le siège Ergo s'ajuste pour tous.



## Levier de pivotement

Permet de pivoter le siège une fois en haut des marches. Existe en option automatique.



## Ecran de contrôle

Facilité de Lecture Informations en temps réel.



## Ceinture de sécurité

Une sécurité supplémentaire lorsque le siège est en déplacement.




## Levier pour monter et descendre le repose-pieds

Repose-pieds par levier.



## Dossier du Siège réglable

Avec des réglages horizontaux pour le dos et de multiples positions de l'assise L'ERGO offre de multiples configurations possibles.

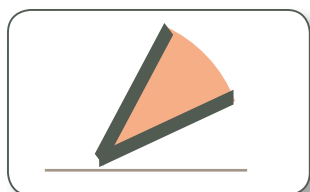

Degré de pente  
De 25° à 62°



Poids Limite  
140kg



# IBIZA PLUS

Couleurs au choix pour l'Ergo



**N° Vert 0 805 050 067**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE



[www.france-accessibilite.fr](http://www.france-accessibilite.fr)